



REGENERACJA-DEPIGMENTACJA

SKRYPT ELEKTROPORACJA

ELEKTROPORACJA MIKROIGŁOWA ND/EPN



TECHNOLOGIA

ND/EPN: zaawansowana technologia odmładzania i pielęgnacji skóry. Nasze profesjonalne urządzenia ND/EPN łączą zalety mikronakłuwania z elektroporacją, umożliwiając skuteczne wprowadzenie składników aktywnych do skóry.

Elektroporacja Bocaré polega na poddaniu komórek działaniu krótkich impulsów elektrycznych o dużej intensywności. Połączenie mikronakłuć i elektroporacji otwiera tysiące mikrokanalików i ułatwia wprowadzenie składników aktywnych do błon fibroblastów, co sprzyja powstawaniu cząsteczek kolagenu i elastyny. To podwójne działanie nie tylko poprawia wchłanianie, ale także intensywnie stymuluje tkanki.


KORZYŚCI

Elektroporacja oferuje znaczące korzyści w porównaniu z konwencjonalnymi urządzeniami mikronakłuwającymi. Pozwala na lepszą penetrację związków aktywnych i mniejsze podrażnienie skóry. Jest to metoda mniej szkodliwa niż inne metody leczenia, a jednocześnie bardziej skuteczna. Może być bezpiecznie stosowana na wszystkich typach skóry i zapewnia szybszą rekonwalescencję.




ZALETY

- Przewaga innowacyjnością i skutecznością nad gabinetami pracującymi dermapenami, które tylko nakłuwają skórę
- Możliwość wykonywania zabiegów porównywalnych swoją skutecznością do lasera frakcyjnego
- Oszczędność pieniędzy w stosunku do droższych urządzeń laserowych
- Bezpieczne zabiegi dające możliwość naturalnego pobudzenia skóry do produkcji nowego kolagenu
- Naturalne i bez powikłań zabiegi, jako alternatywa dla m.in. wypełniaczy

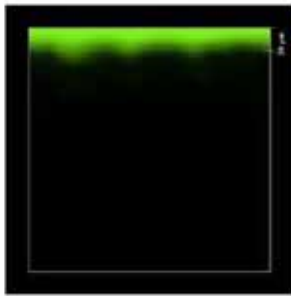


Podanie tradycyjne preparatu na powierzchnię skóry

Głębokość przenikania ok. 20 μm

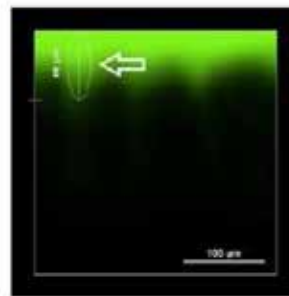

Mikronakłuwanie + podanie preparatu na powierzchnię skóry

Głębokość przenikania ok. 40-60 μm

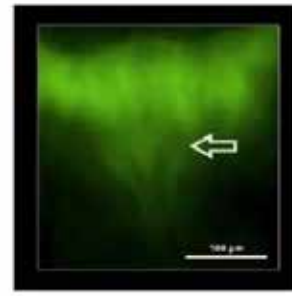

Mikronakłuwanie EPN z elektroporacją + podanie preparatu na powierzchnię skóry

Głębokość przenikania ponad 3x większa

W Bocaré opracowaliśmy zestaw koncentratów do stosowania z urządzeniami ND/EPN. Każda fiołka zawiera składniki aktywne, które nadają jej określone właściwości i zapewniają korzyści dla skóry. W zabiegach proponujemy kombinacje fiolek, tak aby właściwości fiolek, które łączymy, były synergiczne, a efekty były bardziej zauważalne na skórze.

POZNAJ KURACJE ZABIEGOWE

Kuracje ND EPN to gotowe programy zabiegowe:

- NAWILŻAJĄCY
- REGENERACYJNO-DEPIGMENTUJĄCY
- REWITALIZUJĄCY
- UJĘDRNIAJĄCY
- PRZECIWSTARZENIOWY



ELEKTROPORATOR - DANE TECHNICZNE

Rodzaj dermapenu, czyli urządzenia przeznaczonego do zabiegów na twarz o charakterze estetycznym, wyposażonego w nano- i mikroigiełki oraz generator prądu, za pomocą których można modyfikować fakturę skóry. Zabieg elektroporacji mikroigłowej to kontrolowane mechaniczne uszkodzenie skóry, w wyniku którego dochodzi do:

- uwalniania czynników wzrostu stymulujących fibroblasty;
- syntezy białek strukturalnych oraz mukopolisacharydów.

Równoczesna elektroporacja wykorzystująca impulsy elektryczne, czasowo otwiera błony komórkowe gwarantując wnikanie substancji aktywnych do wnętrza komórki znacząco zwiększając efektywność zabiegów.



Nr	Przycisk	Opis
1	Przycisk Start / Stop	Uruchamia i wyłącza urządzenie.
2	Przycisk kontroli poziomu pracy: LEVEL CONTROL	Reguluje prąd wyjściowy i poziom prędkości elektrody igłowej oraz resetuje czas użytkowania.
3	Wybór trybu pracy.	Wybiera prąd wyjściowy, prędkość elektrody igłowej i tryb czasu pracy.
4	Wyświetlacz LCD	Ekran wyświetlający wybrane ustawienia.
5	Regulacja głębokości	Dostosowuje głębokość zabiegu elektrodą igłową. Wycofuje elektrodę igłową.
6	Gniazdo ładowania	Podłączenie ładowarki.
7	Elektroda igłowa	Wyjście prądu elektrodowego na korpusie głównym
8	Część montażowa elektrody igłowej.	Część, do której podłączony jest bolec uziemiający elektrody igłowej.



Nr	Przycisk	Opis
1	Elektroda igłowa	Dostarcza prąd do tkanek.
2	Bolec uziemiający.	Kontakt z korpusem głównym w celu dostarczenia prądu do elektrody igłowej.
3	Jednostka połączeniowa	Łączy się z korpusem głównym
4	Pokrowiec ochronny.	Reguluje głębokość wklucia elektrody igłowej. Wycofuje elektrodę igłową.
5	Sprężyna	Przesuwa elektrodę igłową do tyłu.

Specyfikacja urządzenia:

- Wymagania dotyczące zasilania: 110–240 V AC (50/60 Hz).
- Nazwa produktu: Elektroporator.
- Źródło: 110–240 V AC (50/60 Hz).
- Napięcie wyjściowe: DC 12 V.
- Prędkość (obr./min): 1–3 poziomy (4300/4700/5000 obr./min).
- Korekcja napięcia wyjściowego: poziom 0-5 (0-31,3 V)
- Czas pracy: 30 minut
- Żywotność: 5000 godzin
- Typ silnika: bezrdzeniowy silnik prądu stałego
- Waga: 97 g

Specyfikacja głowicy z igłami:

- Wymienna głowica - jednorazowa multi-igła 9 PIN
- Grubość igły-elektrody: 34G (0,16mm)
- Igła-elektroda: jednorazowa sterylna
- Średnica głowicy: 11 mm
- CE ISO 13485

ND ELECTROPORATION SYSTEM

Głębokość: Urządzenie pozwala na regulację głębokości igły w zakresie od 0,0 do 2,0, co pozwala na dostosowanie zabiegu do potrzeb klienta.

LCD wyświetlacz
Ilość obrotów / min (RPM): poziom 1: 4000 obrotów/min / poziom 2: 4500 obrotów/min / poziom 3: 5000 obrotów/min

Elektroporacja: 5 poziomów intensywności: 0 bez elektroporacji / 1 i 2 mała intensywność / 3 średnia intensywność / 4 i 5 wysoka intensywność

Czas pracy: 30 minut / tryb rosnący



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
 "EU" DECLARATION OF CONFORMITY
 DECLARATION "UE" DE CONFORMITÉ



Oświadczenie producenta

Produkt: Przenośne urządzenie do zabiegów estetycznych metodą mikro-nakłuć
 Model: Electroporator

Zgodność z przepisami dyrektyw europejskich

2014/30/UE – Kompatybilność elektromagnetyczna
 2014/35/UE – Bezpieczeństwo elektryczne
 2011/65/UE – ROHS 2


Standardy odniesień

EN 61000-3-2:2019/A1:2021
 EN 61000-3-3:2013+A2:2021
 EN 55014-1:2021
 EN 55014-2:2021
 EN 60335-1:2012+A15:2021
 IEC 60335-2-115:2021
 UNE-EN IEC 63000:2022


ELEKTROPORATOR - TECHNIKA PRACY

W formie siatki. Generuje aktywację całej tkanki, chroniąc ją przed utratą młodości.


- 1) Linie **pionowe**.
- 2) Linie **poziome**.
- 3) **Ukośnie w prawo**.
- 4) **Ukośnie w lewo**.

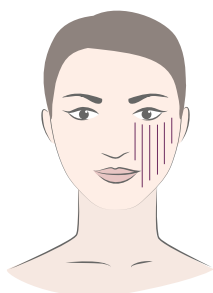


Linie pionowe

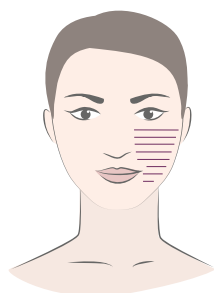

Linie poziome

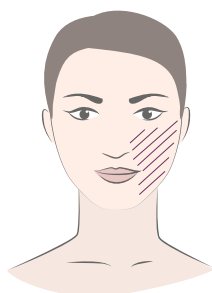


Ukośnie w prawo

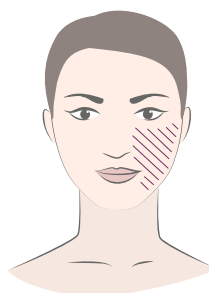


Ukośnie w lewo


- W formie **spiralnej**: na obszary z rozszerzonymi porami.
- W formie **zygzakowatej**: zmarszczki, rozstępy, blizny.
- **Kropkowanie**: okolica ust i oczu, z niewielkim naciskiem

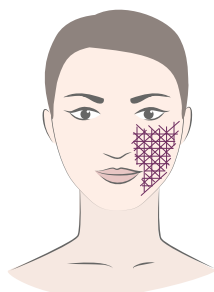


1. Linia siatki
(rys. wyżej)

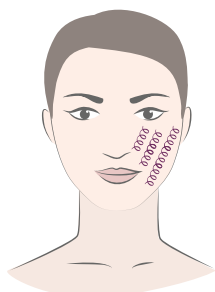

2. Spirale
Obszary z rozszerzonymi porami

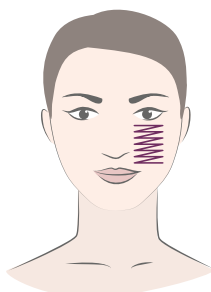

3. Zygzag
Zmarszczki, rozstępy, blizny

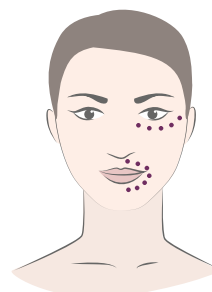

4. Kropkowanie
Okolice ust i oczu z niewielkim naciskiem

RÓŻNICA W PORÓWNANIU Z INNYMI METODAMI

Metoda	Osiągana głębokość
Aplikacja miejscowa	200 mikrometrów
Mikronakłuwanie	600 mikrometrów
Elektroporacja	600 mikrometrów
Mikronakłuwanie + Elektroporacja	1,000 mikrometrów

GŁĘBOKOŚĆ DZIAŁANIA - WSKAZÓWKI

Sugerowane ustawienie głębokości mikronakłuwania			
Twarz	obszar normalny	Od 0,5 do 1 mm	Od 3 do 4 podań
	obszar wrażliwy	Od 0,1 do 0,5 mm	
Skóra głowy	z elektroporacją	Od 0,1 do 0,5 mm	Od 2 do 3 podań
	bez elektroporacji	Od 0,5 do 1 mm	
Ciało	obszar normalny	Od 0,5 do 1 mm	Od 3 do 4 podań
	obszar wrażliwy	Od 0,5 do 1 mm	

CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE PRZEPUSZCZALNOŚĆ

- Wiek: im młodsza skóra, tym bardziej przepuszczalna.
- Lokalizacja: im cieńsza warstwa rogowa, tym bardziej przepuszczalna.
- Nawilżenie: im bardziej nawilżona skóra, tym bardziej przepuszczalna.

ZALETY ZABIEGU Z ELEKTROPORACJĄ (w porównaniu z konwencjonalnym urządzeniem mikroigłowym)

- Mniejsze uszkodzenie skóry. Zabieg można wykonać w krótszym czasie.
- Brak dyskomfortu podczas zabiegu, brak konieczności użycia środka znieczulającego.
- Krótszy czas rekonwalescencji skóry.
- Lepsza penetracja składników aktywnych.
- Większa moc regeneracyjna (głowica z 9 igłami).
- Możliwość wykonywania zabiegu latem (z zachowaniem ostrożności).
- Możliwość pracy z przebarwieniami i głębokimi zmarszczkami z większym bezpieczeństwem.

KORZYŚCI ELEKTROPORACJI

- Rewitalizuje skórę, uzupełniając ją w składniki aktywne.
- Poprawia mikrokrążenie i dotlenia naskórek, rozświetlając skórę.
- Pobudza układ nerwowy i mięśniowy.
- Aktywuje produkcję kolagenu i elastyny.
- Otwiera kanały, dzięki którym składniki aktywne mogą działać w głębszych warstwach skóry.
- Minimalizacja wystąpienia infekcji dzięki zastosowaniu sterylnych głowic jednorazowych.
- Szybszy i skuteczniejszy niż zabiegi manualne.
- Możliwość dostosowania parametrów.

EFEKTY ELEKTROPORACJI

- Twarz jest odmłodzona i wygląda na mniej zmęczoną.
- Skóra odzyskuje elastyczność, wygładza się i regeneruje.
- Ujednolicenie kolorytu.
- Efekt jest całkowicie naturalny, bez sztucznych i wymuszonych efektów.
- Korzyści kumulują się z sesji na sesję.

ZALECENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie stosować na zmiany krostkowe, trądzik, aktywne opryszczki ani inne ostre infekcje lub stany zapalne skóry.
- Nie stosować u kobiet w ciąży.
- Nie stosować na skórę reaktywną
- Nie stosować na skórę z egzemą
- Nie stosować u osób, które przeszły radioterapię lub chemioterapię w okresie krótszym niż 5 lat i zawsze za zgodą lekarza.
- Nie stosować u osób z gorączką lub w trakcie infekcji.
- Nie stosować u osób w trakcie leczenia przeciwzakrzepowego.
- Nie wykonywać zabiegu na ruchomą powiekę, cienie pod oczami ani kąciki ust.
- Skóra musi być czysta i bez makijażu.
- Pomieszczenie musi być czyste i zdezynfekowane.
- Podczas zabiegu osoba wykonująca zabieg powinna nosić maskę i rękawiczki jednorazowe.
- Materiały jednorazowe należy przechowywać w zamkniętym pojemniku.
- Minimalne ryzyko i krótki czas gojenia.
- Brak trwałego uszkodzenia skóry.

WAŻNE

- Zaczerwienienie może pojawić się i zniknąć w ciągu 3 do 48 godzin.
- Po zabiegu nie należy wystawiać się na działanie słońca przez kolejne dni.
- Obowiązkowe jest stosowanie wysokiej ochrony przeciwsłonecznej przez 10 dni po zabiegu.
- Nie należy stosować agresywnych środków higienicznych przez co najmniej 24 godziny po zabiegu.
- Nie należy stosować produktów złuszczących przez 10 dni po zabiegu.

KURACJA REGENERUJĄCO-DEPIGMENTUJĄCA



Specjalnie opracowana kuracja, wspierająca redukcję hiperpigmentacji, blizn potrądzikowych i innych widocznych plam, przyczyniając się do bardziej jednolitego i jaśniejszego kolorytu skóry.

Łączy w sobie wysokie stężenie alfa-arbutyny, która hamuje produkcję tyrozyny – aminokwasu niezbędnego do wytwarzania melaniny w skórze z niacynamidem, który wzmacnia barierę ochronną skóry, działa przeciwzapalnie oraz łagodząco na stany zapalne. Dodatkowo synergia witaminy C, kolagenu i kwasu hialuronowego, skutecznie chroni skórę przed stresem oksydacyjnym, szkodliwym wpływem środowiska oraz oznakami przedwczesnego starzenia. Skóra staje się wyraźnie napięta, miękka i pełna naturalnego blasku.

KURACJA REGENERUJĄCO - DEPIGMENTUJĄCA - ILOŚĆ SESJI ZABIEGOWYCH W KURACJI


Liczba sesji: łącznie 5 sesji (CO 10 LUB 15 DNI)

- 1. SESJA** - Mix koncentratów: Eternal 2 ml + Remove Melanin 2 ml
- 2. SESJA** - Mix koncentratów: Vitamin Skin Glow 2 ml + Eternal 1 ml + Remove Melanin 3 ml
- 3. SESJA** - Mix koncentratów: Vitamin Skin Glow 2 ml + Remove Melanin 2 ml
- 4. SESJA** - Mix koncentratów: Vitamin Skin Glow 2 ml + Eternal 1 ml + Remove Melanin 3 ml
- 5. SESJA** - Mix koncentratów: Eternal 2 ml + Remove Melanin 2 ml

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE KURACJI DEPIGMENTUJĄCO-REGENERUJĄCEJ



ALPHA-ARBUTYNA to ekstrakt z mącznicy lekarskiej, który pomaga redukować przebarwienia o różnej etiopatogenezie powstania, wyrównując koloryt skóry. Działa poprzez hamowanie aktywności tyrozynazy, enzymu biorącego udział w produkcji melaniny. Dodatkowo, alfa-arbutyna posiada właściwości antyoksydacyjne, które pomagają chronić skórę przed stresem oksydacyjnym i szkodliwym wpływem środowiska.

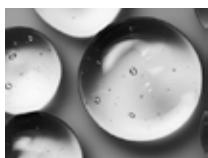


NIACYNAMID to forma witaminy B₃ wykorzystywana w celu odmłodzenia skóry, wzmocnienia jej bariery ochronnej, niwelowania zmian pigmentacyjnych lub łagodzenia stanów zapalnych. Pod względem chemicznym jest amidem kwasu nikotynowego. Chroni skórę przed szkodliwym wpływem środowiska, ale także pomaga w budowie białek, które zapewniają skórze zdrowszy wygląd. Utrudnia dostęp melaniny do powierzchniowych warstw skóry, przez co hamuje proces powstawania przebarwień i ogranicza ich widoczność



WITAMINA C w postaci kwasu askorbinowego. Kwas askorbinowy, bazowa, biologicznie czynna postać witaminy C aktywnie walczy z oznakami starzenia się skóry chroniąc macierz zewnątrzkomórkową przed degeneracją. Stymuluje lepsze ukrwienie skóry, wspomaga proces syntezy kolagenu, wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych, rozjaśnia skórę. Chroni skórę przed uszkodzeniami spowodowanymi działaniem wolnych rodników, wywołanym działaniem negatywnych czynników zewnętrznych, takich jak promieniowanie UV czy zanieczyszczenie powietrza. Obecność kwasu askorbinowego powoduje regenerację witaminy E.




HYDROLIZOWANY KOLAGEN to kolagen, który został przekształcony w krótkie łańcuchy aminokwasów o masie około 3–6 kilodaltonów i znany jest również jako peptyd kolagenowy. Poprawia nawodnienie skóry, uzupełnienia odżywienia komórek, łagodzi i regeneruje uszkodzenia, zwiększa elastyczność, przyspiesza metabolizm komórkowy i zapobiegania powstawaniu zmarszczek.

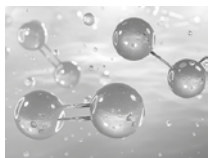

HALURONIAN SODU o bardzo niskiej masie cząsteczkowej (<10 kDa), ekstrahowany z kwasu hialuronowego. Jest humektantem, który głęboko nawilża skórę i uelastycznia ją. Ma zdolność tworzenia bariery na powierzchni skóry, która zatrzymuje wilgoć i zapobiega jej utracie. Jest również bardzo korzystny w naprawie uszkodzonych tkanek skóry i wspomaganiu namnażania komórek. Zmniejsza również widoczność drobnych linii i zmarszczek.



FILTRAT ZE ŚLUZU ŚLIMAKA Cornu aspersum. Korzystnie wpływa na skórę, zapewniając jej nawilżenie, gładkość i jędrność. Ponadto zmniejsza widoczność blizn potrądzikowych, drobnych linii i zmarszczek. Jest to złożona mieszanina proteoglikanów, glikozaminoglikanów, enzymów glikoproteinowych, kwasu hialuronowego, peptydów miedzi, peptydów przeciwdrobnoustrojowych oraz pierwiastków śladowych, takich jak miedź, cynk i żelazo.

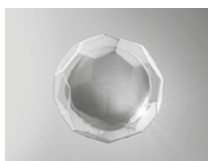

EBP SAPPHIRE w formie nano, to koncepcja technologiczna, w której kamienie szlachetne są sprzężone z peptydami biomimetycznymi. EBP Szafir działa jako nośnik i bariera ochronna dla peptydów, poprawiając ich stabilność i zdolność do penetracji skóry. Ta technologia pomaga zapewnić, że aktywne peptydy dotrą do docelowych komórek skóry, zapewniając optymalną skuteczność.




PEPTYD GLUTATIONOWY (GSH) to tripeptyd występujący w większości tkanek, który odgrywa kluczową rolę w neutralizacji wolnych rodników, detoksykacji i wzmacnianiu układu odpornościowego. Dzięki odwracalnej reakcji odrywania lub przyłączania elektronów, działa w ustroju jako układ oksydo-redukcyjny chroniący grupy –SH białek przed utlenieniem. Bierze też udział w procesie oddychania i jest koenzymem niektórych enzymów oksydoredukcyjnych. Odpowiada za pobudzenie hormonu wzrostu i regenerację komórek.



PALMITOILOTRIPEPTYD-28 to peptyd sygnałowy, który wspiera regenerację macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) w skórze. Naśladuje transformujący czynnik wzrostu beta (TGFβ) i jest kluczowym składnikiem regeneracji macierzy zewnątrzkomórkowej. Znaczaco zwiększa syntezę prokolagenu typu I i III, ujędrniając i wygładzając skórę. Działa poprzez zwiększenie produkcji integrin, co poprawia przyleganie komórek do ECM, oraz stymuluje produkcję inhibitorów proteaz, co z kolei zwiększa poziom kolagenu i elastyny. Usuwa każdy rodzaj zmarszczek.



KWAS SALICYLOWY 1% należy do beta-hidroksykwasów (BHA). Posiada właściwości złuszczące komórki naskórka, antybakteryjne, przeciwzapalne, regulujące łojotok, a także komedolityczne - redukujące zaskórniki. Jest to składnik szczególnie skuteczny w tym zakresie ze względu na swoją rozpuszczalność w tłuszczach, w przeciwieństwie do alfa-hidroksykwasów, dzięki czemu miesza się z lipidami naskórka i lipidami gruczołów łojowych w mieszkach włosowych.

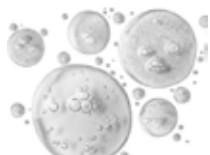

KWAS AZELAINOWY 1% to kwas dikarboksylowy, który posiada szeroki wpływ na funkcjonowanie skóry. Wykazuje nie tylko działanie złuszczące, przeciwłojotokowe i redukujące zaskórniki, ale także przeciwzapalne i hamujące tyrozinazę. Hamując działanie tego enzymu, skutecznie zapobiega powstawaniu przebarwień skórnych, a także stopniowo wyrównuje koloryt cery, nadając jej bardziej jednolity wygląd. Jego wyjątkową cechą jest selektywne działanie – rozjaśnia jedynie te miejsca, w których występują zaburzenia pigmentacji, nie wpływając przy tym na inne obszary skóry.



ARNICA MONTANA FLOWER EXTRACT wyciąg z kwiatów arniki górskiej. Ekstrakt bogaty w związki terpenowe, flawonoidy, olejki eteryczne i kwasy fenolowe. Wykazuje właściwości przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne, łagodzące zaczerwienienia, a także przeciwobrzękowe, co sprawia, że jest skuteczna w redukcji siniaków, opuchlizny i zaczerwienień, a także w pielęgnacji skóry podrażnionej i zmęczonej. Jest silnym antyoksydantem i neutralizuje wolne rodniki.



BISABOLOL to naturalny związek chemiczny, który jest składnikiem olejku eterycznego z rumianku pospolitego. Łagodzi podrażnienia, ma działanie antybakteryjne oraz przyspiesza procesy regeneracyjne, potęguje skuteczność innych składników kosmetyków, poprawiając ich absorpcję. Bisabolol redukuje zmarszczki i szorstkość skóry oraz naprawia uszkodzenia słoneczne. Oprócz działania kojącego, bisabolol może również rozjaśniać przebarwienia. Zapewnia nawilżenie i łagodzi suchość, swędzenie i łuszczenie się skóry.



PANTHENOL zwany również prowitaminą B5, jest przekształcany w organizmie w kwas pantotenowy (witamina B5), który z kolei jest dalej przekształcany w koenzym A, który odgrywa ważną rolę w metabolizmie skóry, między innymi: bierze udział w tworzeniu kwasów tłuszczowych i lipidów skóry, które są kluczowymi składnikami zdrowej bariery skórnej.



TOCOPHEROL witamina E, silny przeciwutleniacz. Hamuje procesy starzenia się skóry wywołwane np. promieniowaniem UV lub dymem papierosowym. Jest doskonałym czynnikiem hamującym rodnikowe utlenianie lipidów w naskórku i skórze właściwej. Wzmacnia barierę naskórkową, hamuje TEWL, zapobiega powstawaniu stanów zapalnych, wzmacnia ściany naczyń krwionośnych i poprawia ukrwienie skóry.



ASHWAGANDHA ekstrakt z korzenia Withania somnifera składa się ze związków przeciwutleniających, które pomagają chronić skórę przed stresorami środowiskowymi i łagodzą widoczne oznaki starzenia. Znany jest również ze swoich właściwości kojących. Korzystne składniki fitochemiczne ekstraktu z korzenia Withania somnifera obejmują kwasy: askorbinowy, kofeinowy i ferulowy. Jest ceniona w świecie kosmetyków przede wszystkim za swoje właściwości adaptogenne, antyoksydacyjne i przeciwzapalne. Jest tradycyjnym ziołem, szeroko stosowanym w medycynie ajurwedyjskiej.

84000506

TRI CLEANSER KIT

Zestaw do przygotowania twarzy

Zestaw do oczyszczania twarzy zawierający trzy niezbędne produkty do usuwania makijażu, oczyszczania i przygotowywania skóry:

- **Balsam oczyszczający:** Antyoksydacyjny balsam oczyszczający, który regeneruje, regeneruje i koi skórę, skutecznie usuwając makijaż i zanieczyszczenia.
- **Tonik dwufazowy:** Łagodzący i niezwykle delikatny dwufazowy tonik micelarny, który koi i odżywia skórę, usuwając zanieczyszczenia i makijaż nawet z wrażliwych miejsc.
- **Lotion oczyszczający:** Tonik, który nawilża, ujędrnia i tonizuje skórę, pozostawiając ją świeżą i miękką.



WSKAZANIA

- każdy rodzaj cery



Pojemność: 300 ml

CLEANSING BALSAM antyoksydacyjny balsam oczyszczający. Bogaty w przeciwutleniacze, regeneruje, odżywia i koi skórę. Innowacyjna formuła - roztapiająca się pod wpływem ciepła, usuwa ślady makijażu i delikatnie nawilża skórę, zapewniając głębokie oczyszczenie i jedwabistą w dotyku skórę. **Główne składniki aktywne:** Trigliceryd kaprylowo-kaprynowy, olej sojowy, stearynian glicerolu, octan witaminy E, ekstrakt z liści szalwii lekarskiej, gliceryna.



Pojemność: 200 ml

BIPHASIC TONIC kojący tonik micelarny poprawiający naturalne funkcjonowanie skóry. Ultra delikatny, uspokajający tonik, który koi i odżywia skórę. Zawiera kombinację aktywnych substancji antyoksydacyjnych, które przywracają skórze blask. **Główne składniki aktywne:** octan witaminy E, ekstrakt z liści szalwii lekarskiej, gliceryna.



Pojemność: 200 ml

CLEANSING LOTION tonik do codziennej pielęgnacji o działaniu nawilżającym, łagodzącym i depigmentującym. To przywracający komfort tonik opracowany do codziennej pielęgnacji i silnego nawilżania cery, który zapewnia cyrkulację wilgoci we wszystkich warstwach skóry, zwiększa produkcję kwasu hialuronowego, jednocześnie korygując zmarszczki dzięki właściwościom naprawczym argireliny i właściwościom antyoksydacyjnym niacynamidu. **Główne składniki aktywne:** Niacynamid, witamina E, Acetyl Hexapeptide-8 (Argirelina), kwas hialuronowy 3D, kwas mlekowy.

84000510

FACIAL PEEL 420

Piling odnawiający skórę na bazie kwasu salicylowego i azelainowego

Peeling o działaniu keratolitycznym, komedolitycznym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym. (pH 2-3). Płynny peeling, który rewitalizuje i rozjaśnia skórę poprzez oczyszczanie i złuszczenie martwych komórek naskórka. Połączenie kwasu salicylowego i azelainowego pomaga redukować zaskórniki, niedoskonałości oraz zaczerwienienia. Polecany do poprawy wyglądu skóry skłonnej do trądziku oraz rozjaśniania niedoskonałości. W przypadku stosowania w ciągu dnia, nałożyć krem ochronny Protection Cream 50+.



WSKAZANIA


- każdy rodzaj cery, szczególnie: tłusta, trądzikowa lub mieszana.
- Wykonaj test skórny 48 godzin przed aplikacją (patrz ulotka dołączona do opakowania), nawet jeśli wcześniej stosowano podobny produkt.

84000515

SOOTHING GEL FACE MASK

Kojąca maska antyoksydacyjna w żelu po zabiegach aparaturowych

Łagodząca żelowa maska do twarzy to prawdziwy koktajl antyoksydantów i składników rozświetlających, który głęboko rewitalizuje skórę, przywracając jej zdrowy i promienny wygląd. Lekka, żelowa formuła wyrównuje koloryt cery, chroni przed przedwczesnym starzeniem i otula skórę kojącym nawilżeniem. Połączenie niacynamidu i prowitaminy B5 intensywnie nawilża, wygładza i wspiera procesy regeneracji, pozostawiając skórę jędrną i odświeżoną. Ekstrakt z arniki, witamina E i bisabolol działają łagodząco, redukując zaczerwienienia oraz niwelując uczucie dyskomfortu.

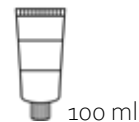

WSKAZANIA

- jako maska łagodząca w zabiegach aparaturowych i po mikronakłuwaniu
- Idealna dla każdego typu skóry, a szczególnie polecana dla cery wrażliwej, reaktywnej i skłonnej do podrażnień.

84000126

REMOVE MELANIN

Koncentrat redukujący przebarwienia

Remove Melanin to odpowiedź na wszystkie problemy z hiperpigmentacją! Potężne połączenie, które skutecznie radzi sobie z przebarwieniami, nierównym kolorytem i przywraca ogólną witalność skóry. Zostało specjalnie opracowane, aby pomóc w redukcji hiperpigmentacji, blizn potrądzikowych i innych widocznych plam, przyczyniając się do bardziej jednolitego i jaśniejszego koloru skóry. Łączy w sobie wysokie stężenie alfa-arbutyny, która hamuje produkcję tyrozyny – aminokwasu niezbędnego do wytwarzania melaniny w skórze, z niacynamidem, który wzmacnia barierę ochronną skóry, działa przeciwzapalnie oraz łagodząco na stany zapalne.



10 ml



WSKAZANIA

- redukcja przebarwień po ekspozycji na promienie UV
- leczenie melasmy
- redukcja przebarwień hormonalnych
- redukcja przebarwień związanych ze starzeniem się skóry
- usuwanie piegów
- wyrównanie koloru skóry

84000123

ETERNAL

Fuzja bioaktywnych molekuł

Eternal to koncentrat stworzony z myślą o zabiegach wymagających intensywnego działania ujędrniającego, regenerującego i nawilżającego. To zaawansowana fuzja bioaktywnych molekuł, których synergiczne działanie przynosi widoczne i długotrwałe efekty w poprawie jakości skóry. Dostarcza do głębokich warstw skóry wysoce biodostępne peptydy o silnym działaniu przeciwstarzeniowym, które neutralizują wolne rodniki, hamują immflaageing oraz wzmacniają naturalną odporność skóry. Równocześnie stymulują syntezę kolagenu typu I i III, wpływając na poprawę gęstości i napięcia skóry. Formułę wzbogacono o kwas hialuronowy, który intensywnie nawilża, poprawia elastyczność skóry oraz wspiera regenerację tkanek, przynosząc efekty wyraźnego odmłodzenia i rewitalizacji.



10 ml



WSKAZANIA

- zmarszczki
- wiotkość skóry
- problemy z suchością skóry
- podrażnienia i zaczerwienienia skóry
- przyspieszenie regeneracji i odbudowy skóry po inwazyjnych zabiegach

84000124

VITAMIN SKIN GLOW

Koncentrat liftingujący z witaminą C, HA i kolagenem

Vitamin Skin Glow to silnie skoncentrowany preparat o działaniu odmładzającym, rewitalizującym i ochronnym, stworzony z myślą o natychmiastowej poprawie kondycji skóry. Innowacyjna formuła ampułek łączy zaawansowaną pielęgnację liftingującą z mocą antyoksydacyjnej regeneracji, zapewniając skórze świeżość, energię i zdrowy blask. Dzięki synergii witaminy C, kolagenu i kwasu hialuronowego, koncentrat skutecznie chroni skórę przed stresem oksydacyjnym, szkodliwym wpływem środowiska oraz oznakami przedwczesnego starzenia. Skóra staje się wyraźnie napięta, miękka i pełna naturalnego blasku, a cera odzyskuje zdrowy, wypoczęty wygląd, już po pierwszym zastosowaniu.



20 x 2 ml



WSKAZANIA

- dla cery zmęczonej
- dla cery z przebarwieniami
- dla cery starzejącej się
- dla cery naczynkowej
- dla cery suchej
- w profilaktyce anti-age

84000508

PROTECTION CREAM 50+

Koloryzujący krem SPF50+ z fuzją bioaktywnych molekuł.

Wielofunkcyjny krem nawilżający Bocaré SPF 50+ to idealny sprzymierzeniec w ochronie i nawilżeniu skóry przez cały dzień. Jego innowacyjna formuła, oparta na bioaktywnych molekułach fuzyjnych (BFM), zapewnia skuteczną ochronę przed promieniowaniem słonecznym, zapobiegając pierwszym oznakom starzenia i uszkodzeniom słonecznym. Jednym z kluczowych składników tego kremu jest kompleks kwasu hialuronowego o wysokiej i niskiej masie cząsteczkowej, pochodzący ze śluzu ślimaka, który zapewnia optymalną równowagę nawilżenia skóry. Składnik ten głęboko nawilża, odświeżając jaśniejszą, gładszą skórę o naturalnym wykończeniu. Wyrównuje również kolor skóry, tuszuje niedoskonałości, nadając jej jednolity i promienny wygląd.



100ml



WSKAZANIA

- każdy rodzaj cery

KURACJA REGENERUJĄCO-DEPIGMENTUJĄCA PROTOKÓŁ WYKONANIA



KROK 1. Przygotuj skórę za pomocą Tri-Cleanser:



Biphasic Tonic. Delikatne oczyszczanie mające na celu usunięcie makijażu i/lub zanieczyszczeń. Jego łagodzący efekt przygotowuje skórę do następnego kroku.

- Sposób użycia: Przed użyciem wstrząsnąć. Nanieść na twarz za pomocą wacika, uwzględniając oczy i usta.



Cleansing Balsam. Balsam do głębokiego oczyszczania. Produkt o bogatej konsystencji, stworzony na bazie olejków roślinnych o właściwościach antyoksydacyjnych i łagodzących, pozostawia skórę czystą, nawilżoną i jedwabistą w dotyku.

- Sposób użycia: Nanieś ok 5 ml produktu na dłonie i umieść je blisko nosa klientki, wykonaj lekkie ruchy nad nosem, aby zapoznać z aromatem produktu i uzyskać początkowy kontakt węchowy. Następnie nałóż na twarz i delikatnie masuj okrężnymi ruchami twarz, szyję i dekolt, aż makijaż i zanieczyszczenia całkowicie zostaną wchłonięte przez produkt. Następnie przemasuj zwilżonymi dłońmi, aż powstanie delikatna emulsja, a następnie dokładnie zmyj wodą, a jeśli to konieczne, za pomocą miękkiego ręcznika.



Cleansing Lotion. Tonik o potrójnym działaniu do codziennej pielęgnacji skóry: łagodzi, nawilża i ujędrnia. Przywraca skórze komfort.

- Sposób użycia: Spryskaj tonikiem twarz i dekolt, a następnie delikatnie wykonaj ruchy oklepywania twarzy, płynnie przechodząc do ruchu podciągnięcia karku, aż do potylicy. Ruchy powtarzamy aż do całkowitego wchłonięcia toniku.



KROK 2. Peeling skóry z użyciem Facial Peel 420.

- Sposób użycia: Nanieść 4 ml produktu na gazę, nacierając wybrane partie skóry, aby wzmacnić efekt zabiegu. Nie ma potrzeby usuwania peelingu, chyba że powoduje on jakiegokolwiek zmiany skórne.



KROK 3. Wybierz fiołki z koncentratami (zalecane połączenie maksymalnie 3 rodzajów 1 zabiegu). Ilość produktu w opakowaniu waha się od około 4 do 6 ml na zabieg. Zaleca się przygotowanie mieszanki za pomocą SHAKERA BEAUTY (wstrząśnij i usuń igłą). Następnie, używając strzykawki bez igły i w rękawiczkach, rozprowadź zawartość fiołki na obszarze poddawany zabiegowi.

UWAGA: Beauty Shakers jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Zacznij od czoła, następnie boki twarzy, a na końcu okolica oka.



WAŻNE: Po zabiegu, w zależności od stopnia podrażnienia i rodzaju skóry klienta, obszar poddany zabiegowi będzie uwrażliwiony. Nadwrażliwość może utrzymywać się od 24 do 48 godzin. Aby uniknąć skutków ubocznych lub niepożądanych, podczas zabiegu zaleca się unikanie ekspozycji na źródła ciepła i intensywnego nasłonecznienia.

Liczba sesji: łącznie 5 sesji (CO 10 LUB 15 DNI)



1. **SESJA** - Mix koncentratów: Eternal 2 ml + Remove Melanin 2 ml
2. **SESJA** - Mix koncentratów: Vitamin Skin Glow 2 ml + Eternal 1 ml + Remove Melanin 3 ml
3. **SESJA** - Mix koncentratów: Vitamin Skin Glow 2 ml + Remove Melanin 2 ml
4. **SESJA** - Mix koncentratów: Vitamin Skin Glow 2 ml + Eternal 1 ml + Remove Melanin 3 ml
5. **SESJA** - Mix koncentratów: Eternal 2 ml + Remove Melanin 2 ml

KROK 4. Wykonaj zabieg elektroporacji - zgodnie ze schematem BOCARE. Po każdym zabiegu wmasuj ewentualny nadmiar produktu, aby całkowicie się wchłonął.



KROK 5. Aplikacja maski łagodzącej.

- Sposób użycia: Nałóż pędzelkiem ok 7,5 ml **Soothing Gel Face Mask** na cały obszar poddany zabiegowi, pozostaw na 10-15 minut. Po upływie czasu zmyj wilgotnym kompresem.



KROK 6. Ochrona

- Sposób użycia: obficie nałóż krem z filtrem przeciwsłonecznym **Protection Cream SPF50+** na cały obszar poddany zabiegowi.

BOCARE POLSKA
ul. Rajska 69
54-028 Wrocław
tel: 0717889694/603634468
www.bocare.pl, kontakt@bocare.pl
www.beautyproject.pl, biuro@beautyproject.pl